

Entnahmeset zur Genetischen Diagnostik

Zuvor bitte Anleitung durchlesen und alle Abstrichtupfer verwenden! - bei Fragen bitte Kontakt aufnehmen!

Vorbereitung:

- 30 Min vor der Entnahme nichts essen und trinken, Säuglinge nicht stillen!
- Alle Abstrichtupfer mit Vor/+ Nachnamen Geburtsdatum beschriften
- Tupfer 1-8 nummerieren, damit alle Tupfer gleichlang durchtrocknen - Gefahr der Schimmelbildung
- Mehrere kleine Gläser vorbereiten, um Tupfer darin abzustellen

Durchführung

- Tupfer nicht mit Gegenständen oder Händen in Berührung kommen lassen!
- **Alle Abstrichtupfer 8-10x an beiden Innenseiten der Wangen kräftig reiben und drehen (Stiel aber nicht zu stark biegen!**
- Nach der Entnahme den Tupfer nach oben zeigend in die Gläser zurückstellen
- **Wichtig: 10–15 Min bei Raumtemperatur trocknen lassen - Gefahr der Schimmelbildung!**
- Alle Abstrichtupfer wieder vorsichtig in die Verpackungshüllen einführen

Probenlagerung

- Probenlagerung bis zum Versand im Gefrierfach!

Transport

- Der Transport sollte schnellstmöglich erfolgen
 - Kontaktieren Sie bitte unsere Probenannahme: 040/ 43 29 26- 40, Montag- Freitag 8.00 Uhr- 17.00 Uhr.
 - Schützen Sie Patientendaten durch eine blickdichte Umverpackung!
- Gern senden wir Ihnen Versandmaterial zu.

ID 1113 -V 1